

Ascend[®] Full Face

Ascienda a un nivel superior de comodidad y conveniencia

Alcance un nivel más alto de comodidad y conveniencia con la máscara facial completa Ascend. Nuestro cojín reemplazable AIR[°]gel patentado se quita y se vuelve a colocar fácilmente para limpiarlo y reemplazarlo, lo que ahorra tiempo y dinero.

Barra espaciadora sin contacto

El diseño único proporciona una estabilidad superior, manteniendo un sello sin contacto con la piel.

Cojín reemplazable

Ahora puedes reemplazar el cojín sin tener que reemplazar todo máscara. Disponible en tres tamaños.

S M L

Pestaña de liberación rápida

El casco ligero y transpirable se quita fácilmente con una mano.

AIR[°]gel[®]

Máximo confort y mínimo

tensión del casco. AIR[°]gel[®] minimiza los puntos de presión y la irritación de la piel.

Codo giratorio de 360°

Para un posicionamiento óptimo del tubo y una movilidad más fácil.

Casco activo Conector

Se mueve como se mueve el paciente para un sello confiable.

¿Qué hace que nuestra máscara facial completa Ascend sea diferente?

Cojín reemplazable : disponible en tres tamaños con arnés AFit de liberación rápida simple y transpirable.

Nuestro cojín reemplazable fácil de usar le permite prolongar la vida útil de su mascarilla.

Conector activo del arnés : se mueve cuando el paciente se mueve para lograr un sellado confiable.

Barra espaciadora sin contacto: el diseño único proporciona una estabilidad superior, manteniendo un sello sin contacto con la piel.



AIR°gel® Tecnología de cojín

Nuestra tecnología patentada AIR°gel con un diseño ergonómico reduce la presión mientras mantiene un sellado efectivo.

Cojín fácil de reemplazar.

S M L



Montaje: Coloque el pasador de alineación superior en la muesca. Empuje la parte inferior hasta que todos los pasadores estén seguros.



Desmontaje: Apriete los lados del marco del cojín para liberar de máscara

Máscaras faciales completas Ascend con casco AFit Especificaciones:

Número Producto	Descripción	Tamaño Cojín	Dimensiones
50825	Sistema de máscara y casco	S,M,L	N / A
50834	Sistema de máscara con casco incorporado	S,M,L	N / A
50801	Máscara con casco adjunto	Pequeño	3.92" profundidad x 3.86" ancho x 7.00" alto
50802	Máscara con casco adjunto	Medio	4.16" de profundidad x 4.20" de ancho x 7.00" de alto
50803	Máscara con casco adjunto	Grande	4.24" profundidad x 4.30" ancho x 7.00" alto
50813	Mascarilla sin casco adjunto	Pequeño	3.92" profundidad x 3.86" ancho x 7.00" alto
50814	Mascarilla sin casco adjunto	Medio	4.16" de profundidad x 4.20" de ancho x 7.00" de alto
50815	Mascarilla sin casco adjunto	Grande	4.24" profundidad x 4.30" ancho x 7.00" alto
50207	Cojín AIR°gel	Pequeño	3.92" profundidad x 3.86" ancho x 7.00" alto
50208	Cojín AIR°gel	Medio	4.16" de profundidad x 4.20" de ancho x 7.00" de alto
50209	Cojín AIR°gel	Grande	4.24" profundidad x 4.30" ancho x 7.00" alto
55058	Casco Afit	N / A	N / A

También por Sleepnet®

Ascend Nasal
reemplazable cojín mascarilla
featuring breakthrough AIR°gel technology



Contacto y soporte

Representante de Sleepnet en su área

www.sleepnetmasks.com

Teléfono: 1-800-742-3646

El siguiente producto está protegido por Patentes estadounidenses 10,974,007, 9,199,054 y otras patentes pendientes



M90056 rev F



No contiene látex de caucho natural



sleepnetmasks.com